

GKE Steri-Record® Typ 1 Indikatorklebeband zum Verschließen von Sterilisierpaketen

STEAM

EO

VH202

Für Dampfsterilisationsprozesse:
211-351, 211-352

Für Ethylenoxid-Sterilisationsprozesse:
212-351

Für Wasserstoffperoxid / Plasma-Sterilisationsprozesse:
214-351

Anwendungsbereich

Das Indikatorklebeband wird auf die Verpackungen bzw. Pakete aufgeklebt und zur Unterscheidung von autoklavierten von nicht-autoklavierten Materialien verwendet. Der Indikator gibt jedoch nur die Information über die Sterilisiergaseinwirkung auf der Oberfläche des Pakets. Da bekannt ist, dass die Sterilisationsbedingungen im Inneren der Verpackung und in Hohlräumen in Abhängigkeit vom Sterilisationsprozess, der Luftentfernung und der Dampfqualität vollkommen unterschiedlich sein können, ist die Anwendung eines Prozessindikators kein Ersatz für die Sterilisationsüberwachung. Der Prozessindikator gibt lediglich die logistische Information, dass das Paket einem Sterilisationsprozess ausgesetzt war, um die Verwechslung von sterilisiertem und nicht sterilisiertem Gut zu vermeiden.

Die Verwendung von Indikatorklebeband gibt keine Auskunft über die Sterilität der Beladung. Um die Sterilität der Beladung zu überwachen, muss in jeder Packung ein Typ 5 oder 6 Indikator an der schwerst zu sterilisierenden Stelle platziert werden. Für minimal-invasiv chirurgische (MIC) Instrumente ist ein validiertes Typ-2 Indikatorensystem zum Nachweis der Sterilgas-Durchdringung und Sterilität zu verwenden.

Produktbeschreibung

Das Indikatorklebeband ist selbstklebend auf Rolle für Dampf-, Ethylenoxid- oder Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozesse erhältlich und ist latexfrei.

Leistungsmerkmale

Jedes Indikatorklebeband enthält einen Prozessindikator gemäß DIN EN ISO 11140-1 Typ 1.

Handhabungsinformationen

1. Indikatorklebeband auf Verpackungen bzw. Pakete aufkleben.
2. Nach der Sterilisation auf Farbänderung (siehe Tabelle) prüfen.

	Indikatorfarbe (vor Sterilisation)	Indikatorfarbe (nach Sterilisation)
Dampf	Grüne Linien	Schwarze Linien
EO	„Schriftzug Gas“ Rot-Braun	Grün „Gas“
VH202	Blau-Violette Linien und Punkte	Rosa Linien und Punkte

3. Nach Gebrauch lässt sich das Klebeband leicht entfernen.

Lagerung und Entsorgung

1. Bei längerer Aufbewahrung H2O2-Indikatorklebeband in der Umverpackung lagern.
2. Bei Temperaturen von 5 bis 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 - 80% RH lagern.
3. Indikatorklebeband nicht gemeinsam mit Chemikalien lagern. Chemikaliendämpfe, z. B. von Wasserstoffperoxid, können den Indikator vor und nach der Sterilisation verändern.
4. Nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Indikatorklebeband kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bei weiteren technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder an das GKE-Anwendungslabor. Wir beraten Sie gern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.gke.eu.

760-024 DE V03 02/2022