

## GKE Steri-Record® Indikatorklebeband mit Prozessindikator zum Verschließen von Sterilisierpaketen



### Für Dampfsterilisationsprozesse:

211-354 (10 Rollen), 211-355 (50 Rollen)

### Für Ethylenoxid-Sterilisationsprozesse:

212-354 (10 Rollen), 212-355 (50 Rollen)

### Für Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozesse:

214-354 (2 Rollen), 214-355 (10 Rollen)

### Anwendungsbereich

Das Autoklavenband bzw. Indikatorklebeband wird auf die Verpackungen bzw. Pakete aufgeklebt und zur Unterscheidung von sterilisierten und von nicht sterilisierten Medizinprodukten verwendet. Der Indikator gibt jedoch nur die Information über die Sterilisiergaseinwirkung auf der Oberfläche des Pakets. Da bekannt ist, dass die Sterilisationsbedingungen im Inneren der Verpackung und in Hohlräumen in Abhängigkeit vom Sterilisationsprozess, der Luftentfernung und der Dampfqualität vollkommen unterschiedlich sein können, ist die Anwendung eines Prozessindikators kein Ersatz für immer geforderte die Sterilisationsüberwachung. Der Prozessindikator gibt lediglich die logistische Information, dass das Paket einem Sterilisationsprozess ausgesetzt war, um die Verwechslung von sterilisiertem und nicht sterilisiertem Gut zu vermeiden.

Die Verwendung von Indikatorklebeband gibt keine Auskunft über die Sterilität der Beladung. Um die Sterilität der Beladung zu überwachen. Es muss in jeder Packung ein Typ 5 oder 6 Indikator an der schwerst zu sterilisierenden Stelle platziert werden. Für Hohlräume, wie z. B. minimal-invasiv chirurgische (MIC) Instrumente, ist ein validiertes Typ-2 Indikatorsystem zum Nachweis der Sterilgas-Durchdringung und Sterilität zu verwenden.

### Produktbeschreibung

Das Autoklavenband ist selbstklebend auf Rolle für Dampf-Ethylenoxid- oder Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozesse erhältlich. Es ist auf einen 3" Kern aufgerollt und hat eine Länge von 50 mm und eine Breite von 19 mm.

### Leistungsmerkmale

Das Autoklavenband enthält einen Prozessindikator gemäß DIN EN ISO 11140-1 Typ 1.

### Handhabungsinformationen

1. Indikatorklebeband vor der Sterilisation auf Verpackungen bzw. Pakete mit Sterilisiergütern aufkleben.
2. Nach der Sterilisation auf Farbänderung (siehe Tabelle) prüfen. Der Indikator gibt nur die Information über die Sterilisiergaseinwirkung auf der Oberfläche des Pakets an.

Prozess	Indikatorfarb-Linien (vor Sterilisation)	Indikatorfarb-Linien (nach Sterilisation)
Dampf	Gelb	Schwarz
EO	Rot	Grün
VH2O2	Violett/Blau	Rosa

### Lagerung und Entsorgung

1. Bei Temperaturen von 5 bis 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 - 80% RH lagern.
2. Autoklavenband nicht gemeinsam mit Chemikalien lagern. Chemikaliendämpfe, z. B. von Wasserstoffperoxid, können den Indikator vor und nach der Sterilisation verändern.
3. Nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Indikatorklebeband kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bei weiteren technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder an das GKE-Anwendungslabor. Wir beraten Sie gern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.gke.eu](http://www.gke.eu).

760-024 DE V01 01-2024