

	Technische Information	730-166-DE		V03
	GKE Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren (RPI) dürfen nicht zusammen mit Chemikalien gelagert werden	Erstellt	20.11.2019	UK
		Änderung	16.09.2021	KP
		Prüfung	16.09.2021	UK
		Freigabe	16.09.2021	UK
Ablage-Nr.: 6.0				

GKE Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren (RPI) werden im Reinigungsprozess mitgeführt und nach dem Programmdurchlauf optisch geprüft. Damit die Indikatoren einwandfreie Funktion haben und ihre Abwascheigenschaft immer gleichbleibt, dürfen die Indikatoren nicht gemeinsam mit Chemikalien gelagert werden.

Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Schrank, in dem sich neben den GKE Indikatoren auch zwei Flaschen aus Kunststoff mit Desinfektionsmittel befinden. Diese Flaschen sind nie 100%ig gasdicht und ihr Inhalt diffundiert durch die Wand. Die zuoberst liegenden Indikatoren reagieren mit dem Desinfektionsmittel, werden fixiert und sind dann nicht mehr abwaschbar.



Die Abbildung links zeigt zwei Indikatoren nach dem Programmdurchlauf, rechts einen korrekt gelagerten und komplett abgewaschenen Indikator, links einen Indikator aus dem oben abgebildeten Schrank, der durch das ausgasende Desinfektionsmittel fixiert wurde und nicht mehr abwaschbar ist.

ACHTUNG: Die Fixierung der Indikatoren durch Desinfektionsmitteldämpfe kann auch dann passieren, wenn die Schublade oder das Schrankfach, in dem die Indikatoren aufbewahrt werden, regelmäßig ausgeräumt, mit Desinfektionsmittel ausgewischt, wieder eingeräumt und dann die Schranktür geschlossen wird. Bei regelmäßiger Wischdesinfektion können deshalb die Indikatoren auch dann fixiert werden, wenn sich keine Desinfektionsmittelflaschen in dem Schrank befinden.